附:背面的4个螺丝位对应与无极悬停支架4个螺丝位打好螺丝固定。







3



一、安装调试:

1、背面接口说明:

音录 报门按开门外功 48 48 电	LAN	Micro-SD	USB	RST	HDMI	DC 12V/5A
%目 言八钮%%% #BA 新物 输数指输输按扩 BA 输 入出 出据示出入钮展 出						⊖-€-⊕
			1			

(1) 网络接口:通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上。

(2) 电源插头:将自带的(12V/5A)电源的输出插头接到此处,给设备供电。

(3) **复位键(RST):** 长按 "RST"键约5~6秒,可自动恢复出厂设置;短按(按2秒内放开) "RST"键,可播报本机 IP地址。

(4) **外部设备接口**:

- ① 门灯接口:将床位分机的电源输出(绿)门灯数据(黄)地线(黑)三芯引线对应与门灯(NBW-ME)的黄、红、黑或与门灯(NBW-ME5)的红、白、黑三芯引线相连;
- ② 按钮接口:将床位分机的外接按钮(棕)地线(黑)两芯引线对应与ANW3的两芯线相连(不分极性);或将床位分机的报警输出(白黑)外接按钮(棕)地线(黑)三芯线对应与ANW4的红、白、黑三芯引线相连。
- 注:其它接口暂无需使用。

二、设置调试:

注: 长按主界而上的系统时间3秒以上进入系统设置(有些设置需要密码方可进入,密码为序列号后四位,可在 系统信息中查看)。

- **系统信息**:可查看分机的详细信息(包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、分辨率、软件版本等信息)。
- 2、基本设置(必填):

床位分机

安装完毕检查无误后,插上电源自动开机,待床位分机启动完毕后,长按主界面上的系统时间3秒以上进入 系统设置,选择"基本设置"项进入(进入需输入密码,密码为序列号后四位,可在系统信息中查看)依次输 入分机的编号及IP地址,例如:

常规设置:

网络设置:

"本机IP地址": 192.168.2.26;

- "子网掩码": 255.255.255.0;
- "默认网关": 192.168.2.1;
- 按"保存",设备将重新启动。

注

(1) 一定要输入所属主机的IP地址; - 套系统内最多可设定1000台病床分机(或会见分机)。

- 以上设置只是举例说明,请根据自己的网络情况进行设置。如主机没连接网络,本机会提示:注册到主机失败。
- (2) 设备支持无线通讯功能,当开启wifi连接时,与医院内无线网络连接,可与探视管理主机、家属分机进行 双向可视对讲。
- 3、**系统时间设置:**可手指上下滑动的方式对年月日、时分秒来设定当前的日期和时间,最后按"保存"。
- 4、**屏保设置:**
- (1) 是否开启屏保功能:默认关闭屏保,拨动右侧开关可开启,开启后可设置屏保休眠时间和画面。
- (2) 屏保休眠时间: 有1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟供选择。
- (3) 屏保画面: 有气泡、数字时钟两种画面供选择。
- 5、音量设置:包括系统音量、媒体音量、通话音量三种,可用手指左右拖动进度条来调整音量的百分比值。
- 6、高级设置:进入高级设置时会弹出密码输入框,密码为序列号后四位(序列号可在系统信息中查看)。
- **7、高级功能:**包括重启、恢复出厂设置,点击其中一种将弹出确认提示框,确认要执行后,自动执行该命令。
- 8、语言设置:有简体中文、英文、繁体中文三种功选择。

设置好后,系统重新启动进入主界面。

三、使用说明:

- 1、病房病人与探访人员双向可视对讲:家属点击探视区家属分机上的电话按钮(即呼叫键),主机会语音提示 "XX号探访分机呼叫"并在"探访机"栏对应的路选按钮变为红色,点击红色路选按钮即可接听,与探视者进 行双向可视对讲,根据探视者的要求,护士人员可按"转接"按钮,在"床位分机"栏选择相应的床位号路选 按钮,探视者即可与病床病人进行双向可视对讲。通话完毕,可按下"挂断"键挂机。
- 2、床位分机与护士站主机间相互呼叫及对讲:护士人员需要与病人通话时,只需在"床位分机"栏选择某路分机 编号,再按"与分机通话"按钮即可与床位分机通话;病人需要呼叫护士人员时,只需按下床位分机界面 上的电话按钮呼叫(或按分机上的CALL键、或手持上的CALL键),即可与护士人员进行双向可视通话。 通话完毕,可按下护士站主机或床位分机面板上的"挂断"按钮挂机。

1