


病床分机

— 产品安装使用说明 —



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

病床分机

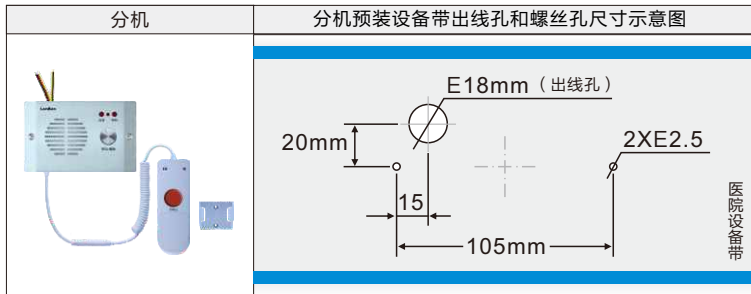

一、分机引线说明：

1、分机的白、黑、黄三芯引线

- (1) **分机与模拟病房门口机 (NBN-BM) 连接时：**将分机背后的白、黑、黄三芯线对应并并联到模拟病房门口机接分机接口 (1、2、3) 总线上；如不用门口机，也可接在主机总线接口 (1、2、3) 上。
- (2) **分机与模数病房门口机 (NN-B10B/NN-B10A) 连接时：**将分机背后的白、黑、黄三芯线对应并并联到模数病房门口机的1、2、3总线上。

2、分机的黄、红、黑三芯引线

- (1) **分机与门灯的连线：**如配有门灯，将三色门灯上的黄、红、黑三芯引线对应并接到分机的黄、红、黑三芯引线上。
- (2) **分机与按钮接线盒的连线：**如配有按钮接线盒，将按钮接线盒上的电源、信号、地接线柱对应连接到分机的黄、红、黑三芯引线上，按钮接线盒的5组2芯引线可外接5个防水按钮。

注：为了提高系统稳定性和抗干扰能力，建议模数主机到分机端（或病房门口机到分机端）的总线采用三芯屏蔽线，线材耐温需在105℃。分机安装完毕后，要将总线屏蔽层全部连通，中间不要出现断层，并将屏蔽层头或尾的一端接大地。

二、基本设置：

例：将分机编码成5号分机

将一台分机或多台分机与病房门口机、主机相连后，通电后进入开机自检状态。待自检完毕，点击主机（或病房门口机）上的“系统设置”菜单，选择“在线分机编码设置”项，准备给分机编码。请按住分机的“呼叫/解除”键至分机指示灯常亮，再松开；此时主机（或模数病房门口机）会收到分机编码请求（左下角出现红色闪烁），然后选择5号路选分机键按下，当主机提示“已对码”，红色闪烁消失，即编码成功。

按上述方法将所有分机依次编码。当编完分机号码后，按分机的“呼叫/解除”键呼叫主机，以确认分机的编号。

三、使用说明：

1、分机呼叫主机及对讲：

按下分机面板上的“呼叫/解除”键或手持呼叫器上的“CALL”键，分机上的呼叫指示灯亮，主机上相应的路选分机键和该模数病房门口机上相应的病床号同时呈红色闪亮，并伴有语音播报，同时该病房门外的门灯亮；待主机选定该路后，分机上的呼叫和对讲指示灯亮；主机方可以免提、手柄二种方式与分机双向对讲，或以TALK键与分机双向对讲（按下TALK键可讲话，松开TALK键可听分机讲话）。

注：如主机呼叫该分机，分机端的对讲指示灯亮，可与主机双向对讲。

2、解除呼叫：分机或手持呼叫器如已呼出，若需解除呼叫，只需再次按下“呼叫/解除”键。