

输液报警器

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

输液报警器



一、使用说明：

- 1、输液管安装好后，按S/R（Start/Reset）键，“Bi-Bi”声后报警器开机。再按S/R键，“Bi”声后进入初始化状态（红灯快闪）。
- 2、约15s后，长“Bi”声进入工作状态（红灯慢闪）。
- 3、输液完毕后，连续“Bi-Bi”声响，红灯快闪，并阻断输液管。
- 4、按S/R键，报警器发出“Bi-Bi”响两声，压轮松开输液管。
- 5、不要在光线变化较大的环境中使用，勿拉动晃动报警器。

注意事项：

- 1、输液管应整齐完全的放入检测槽内。
- 2、输液时不要拉动或晃动报警器。
- 3、不要在光线变化较大的环境中使用。
- 4、关机后至少隔5s才可重新按S/R键开机。

附：输液管安装使用

- 1、将输液管放入输液报警器管槽上、用左手大母指将输液管按下圆形槽内（如图1）。
- 2、用右手分别将输液管上下端稍用力拉下，确保输液管装入输液报警器槽内（如图2）。
- 3、输液管装好后，再分别上下拉动输液管，以保持与输液报警器接触良好（如图3）。



图1

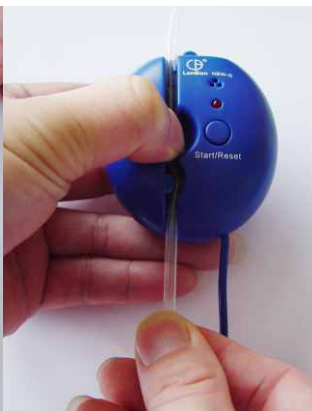


图2



图3