


床位分机

—— 产品安装使用说明 ——




LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

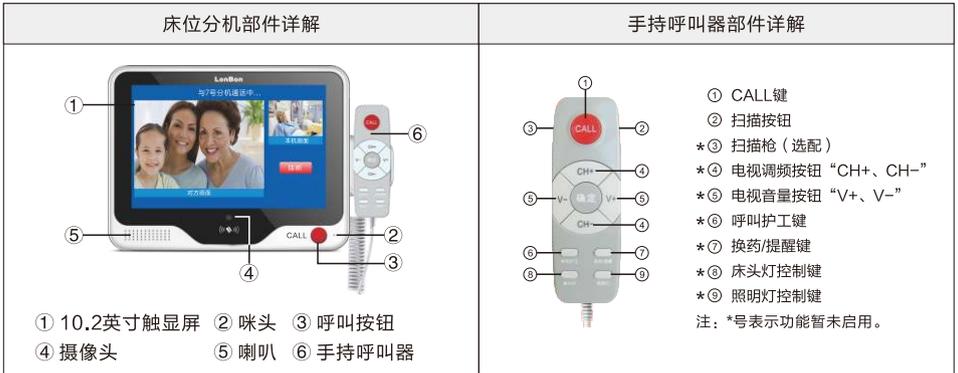


一、安装调试：

1、产品安装图

壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

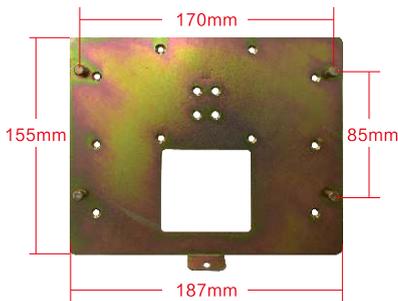

壁挂墙面安装螺丝开孔尺寸图

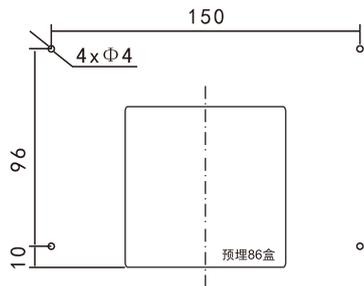

说明：

墙面打螺丝，螺丝孔距离：96x150mm，将配送的壁挂支架安装在墙壁上，相应的线缆做好标签放在86盒里；再将设备挂于支架上，主机背面有四个挂孔，对应于安装支架的挂柱上，再将设备向下推动卡住即可。

二、设置调试：

注：长按主界面上的系统时间3秒以上进入系统设置（有些设置需要密码方可进入，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看）。

1、系统信息：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、分辨率、软件版本等信息）。

2、基本设置（必填）：

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台设有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

安装完毕检查无误后，插上电源自动开机，待床位分机启动完毕后，长按主界面上的系统时间3秒以上进入系统设置，选择“基本设置”项进入（进入需输入密码，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看）依次输入分机的编号及IP地址，例如：

(1) 常规设置中：

“本机编号”：52（注：范围为1-1000，编号不可重复）；

“主机IP地址”：192.168.2.12（注：主机IP是唯一的，分机处此项设置应填写同一个主机IP地址）；

(2) 网络设置中：

“本机IP地址”：192.168.2.26；“子网掩码”：255.255.255.0；“默认网关”：192.168.2.1；

按“保存”，设备将重新启动。

注：①一定要输入所属主机的IP地址；一套系统内最多可设定1000台病床分机。以上设置只是举例说明，请根据自己的网络情况进行设置。如主机没连接网络，本机会提示：注册到主机失败。

②设备若配置移动推车时支持无线通讯功能，当开启WIFI连接时，与医院内无线网络连接，可与探视管理主机、家属分机进行双向可视对讲。

3、系统时间设置：可手指上下滑动的方式对年月日、时分秒来设定当前的日期和时间，最后按“保存”。

4、屏保设置：

- 是否开启屏保功能：默认关闭屏保，拨动右侧开关可开启，开启后可设置屏保休眠时间和画面。
- 屏保休眠时间：有1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟供选择。
- 屏保画面：有气泡、数字时钟两种画面供选择。

5、音量设置：包括系统音量、媒体音量、通话音量三种，可用手指左右拖动进度条来调整音量的百分比值。

6、高级设置：进入高级设置时会弹出密码输入框，密码为序列号后四位（序列号可在系统信息中查看）。

7、高级功能：包括重启、恢复出厂设置，点击其中一种将弹出确认提示框，确认要执行后，自动执行该命令。

8、语言设置：有简体中文、英文、繁体中文三种功选择。

设置好后，系统重新启动进入主界面。

三、使用说明：

1、患者与家属双向可视对讲：

家属点击探视区家属分机上的电话按钮（即呼叫键），主机会语音提示“XX号家属分机呼叫”并在“家属分机”栏对应的路选按钮变为红色，点击红色路选按钮即可接听，与探视者进行双向可视对讲，根据探视者的要求，护士人员可按“转接”按钮，在“病床分机”列表选择相应的床位号路选按钮，探视者即可与患者进行双向可视对讲。通话完毕，可按下“挂断”键挂机。

2、床位分机与护士站主机间相互呼叫及对讲：

- (1) 护士人员需要与病人通话时，只需在“床位机”栏选择某路分机编号，再按“与分机通话”按钮即可与床位分机通话。
- (2) 病人需要呼叫护士人员时，只需按下床位分机界面面上的电话按钮呼叫（或按分机上的 呼叫 键、或手持上的CALL键），即可与护士人员进行双向可视通话。

通话完毕，可按下护士站主机或病床分机面板上的“挂断”按钮挂机。

注：如果主机设置了该床位分机的病人信息，在主界面可以显示该病人的病人信息。