


# IP床位分机


—— 产品安装使用说明 ——



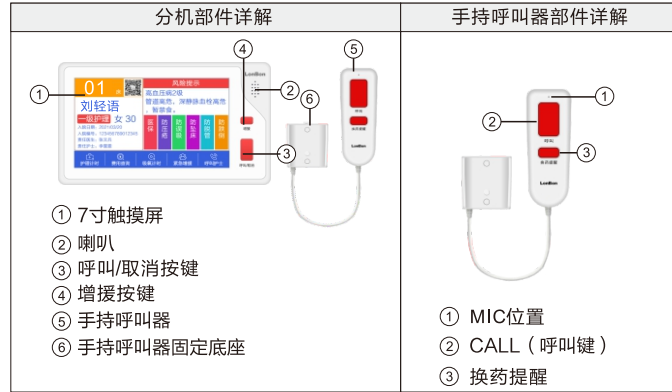

## 一、安装调试:

### 1、产品安装图:

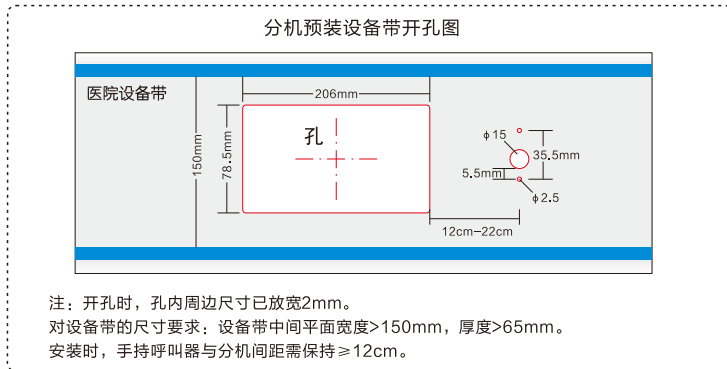

### 2、背面接口说明:

(1) **网络接口**: 通过网线插入到路由器LAN端或交换机任一端口上 (需和所属主机在同一局域网内)


(2) **电源接口 (+、-)**: 将-、+分别于领购电源箱的其中1对GND+24V接线柱对应连接, 给分机供电 (分机供电范围12-24V)。

(3) **手持接口**: 连接呼叫手持, 连接后可通过手持呼叫护士。

(4) **外部设备接口**: (外接设备前, 需先将分机断电, 待设备接入后再给分机通电)

① **接防水按钮**: (此接口无法同时连接不同型号的按钮)

接ANW3时: 不分极性, 将ANW3的两芯线分别与防水按钮、地线相连。

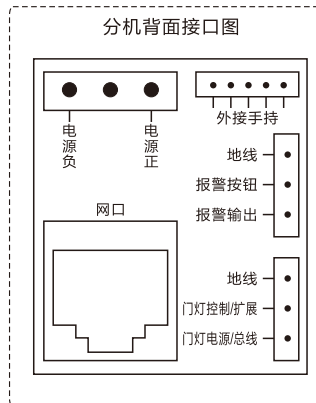

接ANW4时: 将ANW4的红白黑线分别对应接在外扩电源、报警按钮、地线。

② **接门灯**: 将门灯的端子对应插入门灯接口中即可 (根据安装位置自行延长门灯线)

③ **接AN-K**: 端子接入门灯接口 (根据安装位置自行延长门灯线)

## 二、设置调试:

1、长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统功能设置。

2、系统设置中有些设置项需输入密码方可进入, 密码为序列号后四位, 可在“系统信息”中查看序列号信息。

3、输入序列号后4位进入基本设置使用手动设置网络时, 输入本机编号 (包括: 所属主机编号、本分机编号)、地址盒IP、本机IP地址

例如:

“服务器IP”: 192.168.1.169 (输入与主机同一服务器)

“IP地址”: 192.168.1.22

“子网掩码”: 255.255.255.0

“默认网关”: 192.168.1.1

最后按“保存”键, 分机将重新启动。设置完成, 分机可正常呼叫对讲。

4、恢复出厂默认值: 将恢复成本机出厂时的默认设置。

5、安装使用说明: 可供查看本机的简要说明。

6、系统信息: 可查看分机的详细信息 (包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息)。

## 三、使用说明:

1、**一键呼叫**: 可通过手持呼叫器、或触摸按键向主机发起呼叫请求, 主机接听后即可与分机双向对讲。

2、**更多应用**: 点击后进入更多应用功能菜单。

3、**紧急增援**: 级别优先于普通呼叫, 按下“紧急增援”键后主机会播报“xx床紧急增援”。

4、**护理计时**: 第一次点击开始计时、再次点击结束计时, 计时过程会存储在主机或服务器端查看, 用于护士护理工作的记录。

5、**IPC联动**: 支持绑定网络摄像机, 护士可通过主机对房间内内进行视频监护。

6、**夜晚模式**: 支持夜晚模式, 根据主机设置的夜间模式关屏休眠。

7、**在线监测**: 可监测设备在线状态, 出现掉线或故障连接不通时, 自动提醒至照护站主机。

8、**内置定位信标**: 提供其它穿戴设备实现精准定位使用。