

无线对讲分机

— 安装调试使用说明 —



一、安装调试

安装在长者床头上方，距地约1.3米，且手柄垂直放下能便于长者按键呼叫报警。支持一键呼叫照护站监护主机，主机接警可与之进行语音通话，同时分机支持向监护主机发起请求增援功能。到达和完成按键可用于记录报警处理流程或护理记录。

无线对讲分机内置定位信标，覆盖半径5-7米，长者在此覆盖区域用监护手表报警时，将会自动携带床位号信息发送至监护主机。



1、产品安装图



二、使用说明

1、接线说明

无线对讲分机的接口含：Type-C电源接口、集中供电接口、外接门灯接口、外接按钮接口。接线说明如下：

- (1) Type-C电源接口：用于自带适配器供电使用。（说明：Type-C电源电压5V）
- (2) 集中供电接口：电源接口对应的红线接正极，黑线接负极。（说明：集中供电电压12V-24V）
- (3) 外接按钮接口：
 - ① 外接ANW3按钮：将分机外接按钮接口的白色线和黑色线，接在ANW3洗手间按钮的2p线上(不分极性)。
 - ② 外接ANW4按钮：将分机外接按钮接口的红色（电源）、白色（信号）、黑色（地线），对应ANW4按钮的红色（电源）、白色（信号）、黑色（地线）进行接线，颜色一一对应。（说明：仅为集中供电时支持）
- (4) 外接门灯接口：将外接门灯接口的黄色（电源）、棕色（门灯）、黑色（地线），对应门灯（如:HBW-ME）的红色（电源）、白色（门灯信号）、黑色（地线）进行接线，颜色一一对应。（说明：外接门灯接口功能仅为集中供电时支持）

2、调试说明

无线对讲分机正常工作后，打开“机构App”，进入“设备绑定-房间设备绑定”，在“床位设备”里面找到“床头 无线对讲分机”，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该无线对讲分机，点击App上“绑定”按钮，根据App上提示完成绑定。（详情查看机构App）

3、使用说明

- (1) 一键呼叫：按一下“呼叫”键，可一键呼叫监护主机。
- (2) 护理记录：按一下“到达”键，分机语音提示“到达现场”，监护主机显示“正在护理中”，再按下“完成”键，分机语音提示“完成护理”，监护主机结束护理状态，并生成护理记录，可在主机的“系统设置-护理记录”中查看。
- (3) 护理流程管控：分机正在呼叫监护主机时，按一下“到达”键，分机呼叫状态解除，监护主机显示分机“正在护理中”，再按一下“完成”键，分机语音提示“完成护理”，监护主机结束护理状态，并生成护理记录。
- (4) 紧急增援：按一下“增援”键，可发送紧急增援请求到监护主机。

三、技术参数

通讯方式：	4G Cat.1	安装方式：	粘贴式或86盒
功耗：	< 10W	扬声器功率：	8Ω 1.5W
面板尺寸：	87x86x25mm	手持尺寸：	33x104x45mm(含底座高度)
手持底座：	Φ65mm	手持线长：	1米
供电方式：	标配适配器供电（DC5V2A），支持集中供电（DC12V-24V）		