


心率呼吸监护带（WiFi版）

— 安装调试使用说明 —




一、安装调试

心率呼吸监护带铺设在床单下方。产品通过专业传感器多维度采集长者的生理参数,包括心率、呼吸、体动等数据,实时上报至后台,并且通过算法实时分析,出现异常能立即自动报警,提醒护理人员及时处理。

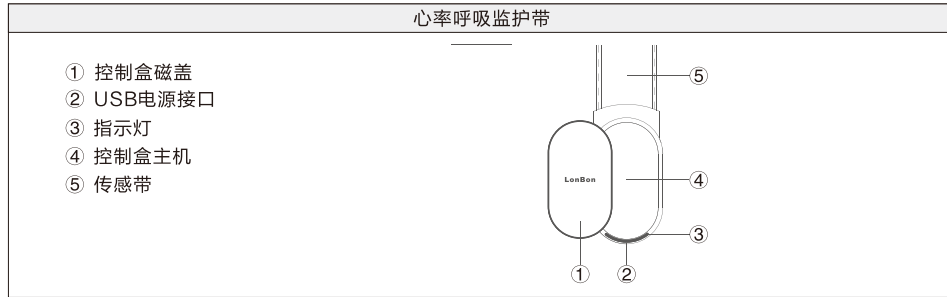


1、产品安装图

- (1) 揭开控制盒磁盖,在床垫上铺好心率呼吸监护带(躺下后位于胸腹部位置),盖好床单。
- (2) 盖上磁盖,并接通电源。可看到指示灯显示绿灯1秒后熄灭,开机成功。

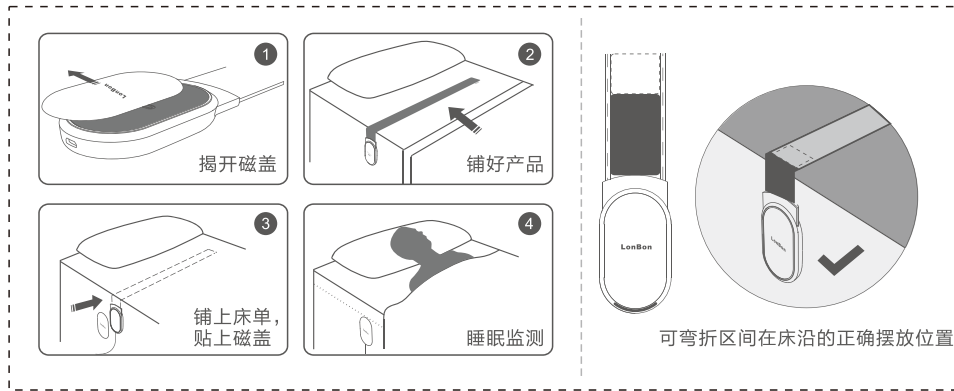

2、正确铺设方法

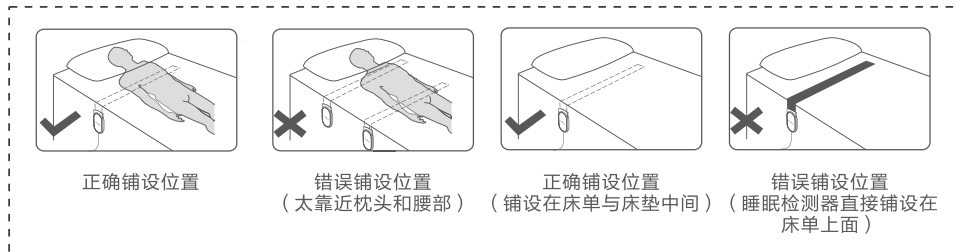

二、使用说明

1、注意事项

- (1) 一张床只能安装一个心率呼吸监护带,且只能监测一人。
- (2) 本产品并不是医疗设备或者防猝死设备,使用者不应该完全依赖而忽略对长者的照顾。
- (3) 此产品不适用于戴心脏起搏器的人群!
- (4) 使用此产品时,应保证床表面平坦稳固;请勿在检测器上方放置凉席,否则会导致监测不准确。

2、调试说明

- (1) 心率呼吸监护带正常工作后,打开“机构养老”/“社区养老”App,进入“长者房间设备绑定”界面,选择任一房间进入绑定设备(若无房间,请先在机构养老综合管理平台上添加一个房间);
- (2) 下拉到床位设备,点击“请选择设备绑定”,在心率呼吸监护带里点击“去绑定”,将手机尽量靠近心率呼吸监护带的控制盒,点击App上的“绑定”按钮,选择最强的信号录入床垫,并填写WiFi信息和信息交互服务器的IP地址。

点击下方的“保存并提交”按钮,完成心率呼吸监护带(WiFi版)的绑定。

三、技术参数

工作电压:	5V	通信方式:	WiFi
监测技术:	压电	传感带尺寸:	830 × 45 × 1.5mm
离床监测:	支持	体动判断:	支持