


输液提示器/充电板

— 安装调试使用说明 —

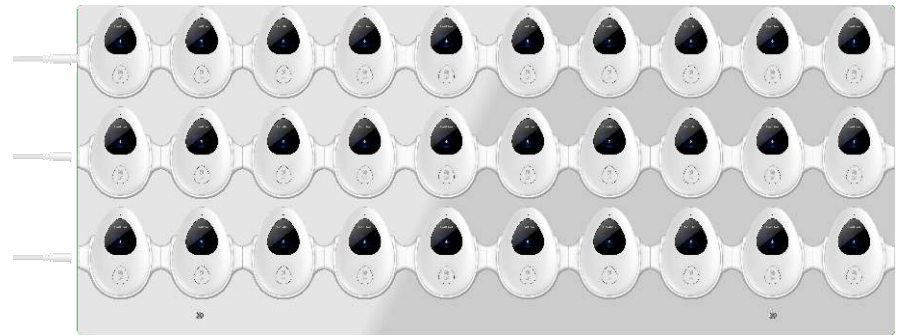

一、安装调试

1、输液提示器安装图



- (1) 输液管应整齐完全的放入检测槽内。
- (2) 输液时不要大幅度拉动或晃动提示器。
- (3) 不要在光线变化较大的环境中使用。

2、充电板安装图



二、设置调试

- 1、**安装准备**: 在安卓手机上安装“医院设置工具”App。
- 2、**开机**: 长按“确定”按键2秒, 输液提示器开机。
- 3、**设备对码**: 第一次使用时, 开机后屏幕显示“长按2秒确定进入对码”, 长按2秒确定后会进入“请在APP上输入床位号按搜索”。打开医院设置工具APP, 先在“设备运维-系统设置”界面中设置好信息交互服务器和物联网服务器的IP和端口; 进入“设备设置-蓝牙类设备-输液提示器-添加”界面, 选择所属病区并输入床号, 点击“去绑定”进入绑定界面, 将手机靠近输液提示器, 点击“绑定”按钮开始搜索, 选择信号最强的输液提示器, 再点击“保存”, 输液提示器提示“对码成功”同时屏幕上方显示床号, 则表示输液提示器绑定完成。

三、使用说明

- 1、**安装**: 先通过输液管阀门调整好液体的滴速, 再将输液管的滴壶卡进输液提示器背部凹槽内。
 - 2、**开始输液**: 待机状态下屏幕显示“XX床, 按确定开始”, 按一下确定键后则进入输液状态, 此时屏幕显示“长按确定退出, 输液中...”, 检测出滴速后会自动跳转到“XX滴/分钟, 输液中...”, 输液状态下长按确定键可退出到待机状态。
 - 3、**输液完毕**: 检测到输液管内无液体时, 输液提示器发出“di-di-di...”蜂鸣声并夹紧输液管, 同时屏幕显示“输液完毕, 请按确定解除”并将报警信息发送至护士站一览表, 此时按“确定”键即可解除报警, 同时压轮复位松开输液管。
 - 4、**充电**: 将输液提示器磁吸在充电板上即可充电。
 - 5、**升级**: 输液提示器放在充电板上进入充电状态, 打开医院设置工具APP, 进入“设备运维-设备升级-输液提示器升级”界面, 选择升级文件后点击定制版本升级, 升级过程中输液提示器会进入黑屏状态, 升级中禁止拿离充电板, 升级完成后输液提示器将自动开机。
 - 6、**关机**: 在6秒内, 连续按下“确定”键15次, 输液提示器关机。
- 注**: 当滴壶内液面超过输液提示器底部时, 可能无法测出滴速, 但不影响输液完毕的判断。