


跌倒报警器

— 安装调试使用说明 —




一、安装调试

安装在洗手间离地2.3~3米的天花板上；支持语音通话、跌倒报警，洗手间滞留报警、长时间未进洗手间提醒等功能。电源供电，无需布线，采用独特的防水设计，即使在潮湿环境中也能正常工作。

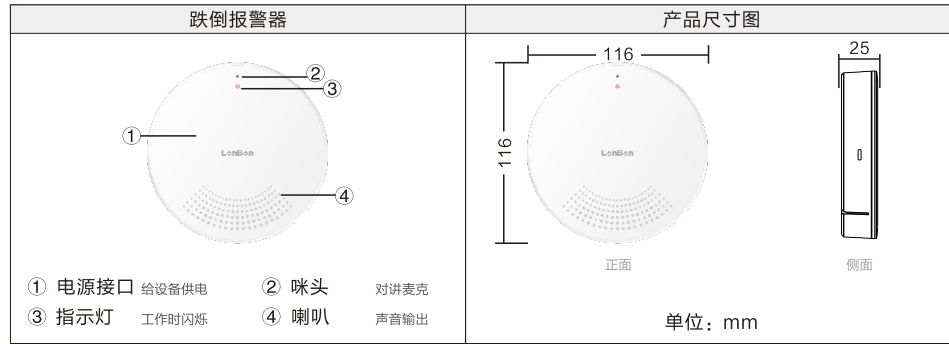

1、产品安装图

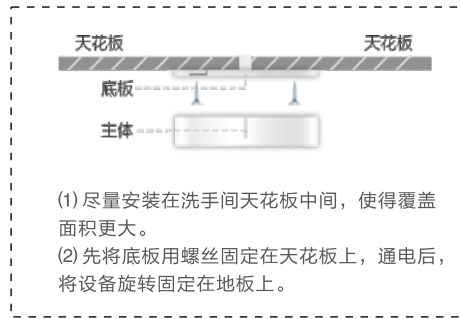

二、使用说明

1、设备使用

将跌倒报警器插上电源后，查看指示灯状态。待指示灯红灯变成常亮并快速熄灭状态时，表示工作正常。

站在设备下跌倒，听到语音提醒“检测到您跌倒了，2分钟后将自动报警，若身体无恙，可起身解除报警”，说明设备可以正常报警。

2、设备绑定

打开“机构养老App”，在“设备安装-设备绑定-房间录入及设备绑定”中，按照指示，在“洗手间设备”中找到对应图标的跌倒报警器，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该跌倒报警器，点击App上“绑定”按钮，根据App上提示完成绑定。

三、技术参数

产品名称:	跌倒报警器	供电方式:	Type-C
工作电压:	9V	通信方式:	4G Cat.1
探测角度:	140°	探测距离:	4*5米
防水等级:	IP67	工作湿度:	10%~99%
工作温度:	-10℃~±55℃	尺寸:	φ116*25mm
安装方式:	吸顶式安装		