

6、护理记录：

支持查询历史护理记录情况。

7、护理交接：

门口机进入护理之后自动开启护理交接功能，当其它床位分机呼叫时，该房间的分机上将显示其它床位的呼叫信息，支持接听并与其双向通话。

8、床垫数据显示：

当该床位绑定了蓝牙床垫，分机上将自动显示该床垫的心率、呼吸数据。

说明：功能使用是否需要刷卡验证，可在信息交互服务器中运维管理--网络设备管理--床位分机设置中进行开启关闭。

IP床位分机


产品安装使用说明





一、安装调试：

1、产品安装图：

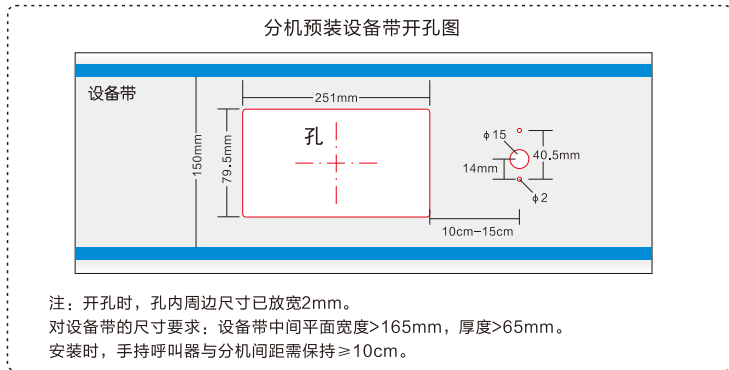

2、背面接口说明：


(1) **网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）。

(2) **电源接口：**将右侧图示的最上面“电源+、电源-”分别于另购电源箱的其中1对GND +24V接线柱对应连接，给分机供电（供电范围为12~24V）。

(3) **外部设备接口：**（外部接口设备必须先接入再通电，拔掉时必须先断电）

① 外接门灯(HBW-ME)：将接门灯的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。

② 外接门灯(NBW-ME5)：将接门灯的“电源+、控制、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。

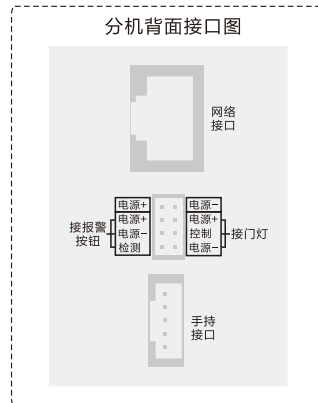

- ③ 外接报警按钮(ANW3)：将接报警按钮的“电源-、检测”2芯引线对应接到报警按钮的2芯引线上，无需分极性。
④ 外接报警按钮(ANW4)：将接报警按钮的“电源+、电源-、检测”3芯引线对应接到报警按钮的红、黑、蓝3芯线上。

二、设置调试：

1、长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统设置。

2、系统设置中有些设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。

3、输入序列号后四位进入基本设置，输入本机编号（包括：所属主机编号、本分机编号）、地址盒IP、本机IP地址。例如：

“本机编号”：1号主机 + 1号分机

“地址盒IP”：192.168.1.169(输入与主机同-地址盒)

“IP地址”：192.168.1.11

“子网掩码”：255.255.255.0

“默认网关”：192.168.1.1

最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

4、系统信息：

可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息）。

三、使用说明：

1、信息显示：

该床位分机有长者入住后，可显示床位号、长者信息详情、床垫检测数据、过敏药物、过往病史、住院号二维码。

2、呼叫照护站：

按下手持上的“呼叫”按键，或主界面上的“呼叫照护站”按键，可向照护站主机发起呼叫，主机接通后可通过手持跟主机进行双向通话。

3、紧急增援：

按下主界面上的“紧急增援”按键，可向主机发起紧急增援，主机接通后可通过手持跟主机进行双向通话。

4、消息通知：

支持接收来着信息交互服务器发布的通知内容。

5、护理清单：

支持获取机构平台制定的护理计划，可进行开始护理和完成护理，护理是否完成自动生成记录。