

4、进入护理：

按下门口机右下的“进入护理”按键，即进入护理中状态，主机及其他设备会提示该房护理中等提示，取消时再次按下护理按键即可。若该门口机所绑定的床位分机有呼叫时按下护理按键，会先清除病床分机的呼叫，再进入到护理中状态。

5、呼叫解除：

当房间内分机呼叫时，在门口机对应的床位栏亮红色、门灯闪烁、语音播报提醒，点击可以与分机通话。

6、护理员模式：

- (1) 今日待护理：显示今日待护理计划。
- (2) 房间状态：支持设置该房间的当前状态，可选择请保持安静、正在清洁、非请勿进，支持设置生效时长。
- (3) 紧急增援：按下主界面上的“紧急增援”按键，可向主机发起紧急增援，主机接通后可通过手持跟主机进行双向通话（该功能是否需要刷卡验证，可在信息交互服务器上设置）。

说明：功能使用是否需要刷卡验证，可在信息交互服务器中运维管理--网络设备管理--床位分机设置中进行开启关闭。接门灯扩展，主要用来门口机的进入护理状态、绑定的病床分机呼叫、以及洗手间报警等闪亮提示用。

IP门口机


产品安装使用说明



一、安装调试

1、产品安装图

壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

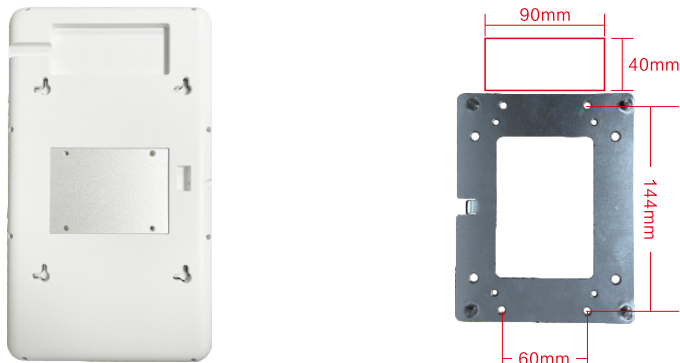

说明:

- 1、如图所示，在墙面上打4个螺丝孔，螺丝孔距离为60*144mm；
- 2、在壁挂板的上方5mm处，再开一个槽，尺寸为40*90mm，相应的线缆从此槽引出；
- 3、将配送的壁挂支架根据螺丝孔位固定在墙面上，相应的线缆接好设备的接口或引线上，线材整理好放入槽内；再将设备挂于支架上，设备背面有4个挂孔，对应于壁挂支架的挂住上，最后将设备向下推动卡住即可；
- 4、侧面有个M4的锁紧螺丝需要锁紧防脱。

2、背面接口说明:

(1) 网络接口: 将配送的“网络水晶头转引线”插入到网口接口(注意方向)，再连接网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上(需和所属主机在同一局域网内)。

(2) 电源接口: 将配送的“电源红黑引线”插入到电源接口(注意方向)，红线、黑线分别于另购电源箱的其中1对+24V、GND接线柱对应连接，给分机供电(供电范围12~24V)。

(3) 外部接口: (外部接口设备必须先接入再通电，拔掉时必须先断电)


① 外接门灯(HBW-ME): 将门灯电源(白)、门灯控制(棕)、地线(黑)与门灯的“红”“白”“黑”三芯线相连。

② 外接门灯(NBW-ME5): 将接门灯的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。

③ 外接报警按钮(ANW3): 将接报警按钮的“电源-、检测”2芯引线对应接到报警按钮的2芯引线上，无需分极性。

④ 外接报警按钮(ANW4): 将接报警按钮的“电源+、电源-、检测”3芯引线对应接到报警按钮的红、黑、白3芯线上。

分机背面接口图

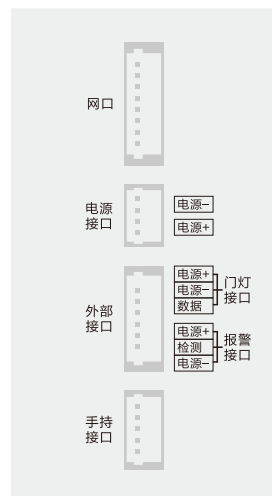

二、设置调试

注: 由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台设备，避免网络冲突。

1、基本设置:

设备通电后，在启动界面会显示本机的IP地址(默认为192.168.1.168)，登录该设备的网页(登录地址即该设备的IP地址，账号密码均默认为admin)，进入基本设置界面，设置方法如下，如将该设备设置成1号主机下的1号门口机，依次输入以下信息

A、编号设置

本机编号: 主机路数根据1号主机实际型号路数选择，路数决定了门口机的编号最大值，主机编号框输入1，门口机编号框输入1。

地址盒IP: 输入和1号主机基本设置界面里的相同服务器地址盒IP，如192.168.1.169。

B、网络设置

IP地址: 输入该设备所分配的IP地址，如192.168.1.101。

子网掩码: 输入该设备所分配的掩码地址，如255.255.255.0。

默认网关: 输入该设备所分配的网关，如192.168.1.1。

C、服务器设置

服务器IP地址: 输入信息交互服务器所分配的IP地址，如192.168.1.169。

通讯端口: 默认8080。

2、关联床位分机:

在信息交互服务器网页运维管理--网络设备管理--门口机设置中绑定该门口机所在房间的床位即可。

3、设置工具或APP:

打开设置工具，根据门口机的mac地址搜索或直接选择该门口机进行编号、网络、病房号、以及绑定的病床分机等设置。

打开APP，通过扫描门口机初始界面上的二维码信息，对该门口机进行编号、网络、病房号、以及绑定的病床分机等设置。

三、使用说明:

1、信息显示:

该门口机关联了床位，可显示房床信息、长者基本信息、责任医生和责任护士姓名和照片、在院状态、护理等级等。

2、呼叫照护站:

按下门口机界面上的“呼叫照护站”按键，可向照护站主机发起呼叫，主机接通后可通过手持跟主机进行双向通话。

3、消息通知:

支持接收来着信息交互服务器发布的通知内容。