

护士手表


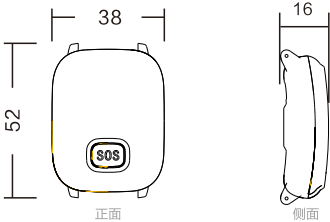
— 安装调试使用说明 —



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试

手表接收机基于医院局域网WiFi通讯，通过“医院设置工具APP”对手表的WiFi网络，直属主机等参数进行配置，配置成功后即可完成病区内分机呼叫及报警提示。

手表接收机	产品尺寸图
 <p>① 信号强度 ② 电池电量 ③ 时间日期 ④ SOS按键 ⑤ 充电接口</p>	 <p>正面 侧面</p> <p>产品尺寸图 (单位: mm)</p>

二、使用说明

1、设备使用

- (1) 长按2秒“SOS”按键开机，开机后再按“SOS”按键进入二维码界面。
 - (2) 打开设置工具APP，进入医护手表设置，扫描手表二维码进入配置状态。
 - (3) 选择手表需要连接的WiFi账号，点击！输入WiFi密码，连接WiFi（按照医院网络要求填写，需要在设置工具APP中输入密码连接WiFi，若之前已经连接该WiFi需要忘记密码）。
 - (4) 为了后续维护方便，填写基本设置时需有规划，可按照工具APP示例填写。设置成功后即可使用。
- 注：所连接的wifi名称应是以下组合：纯字母、字母加字符、字母加数字、字母加数字加字符等方式。

三、技术参数

产品名称:	护士手表	电池类型:	锂电池 (550mAH)
工作时长:	2天 (连续使用)	存储容量:	RAM-64KB、ROM-512KB
防水等级:	IP68	工作湿度:	10%~99%
工作温度:	-10℃~+60℃	充电时间:	2H左右
充电方式:	磁吸式	显示屏 :	0.95英寸 (96X64像素)
产品材质:	ABS+PC		