


产品使用说明




手表接收机

一、基本设置：

- (1) **开机：**长按手表右侧按键（右上角按键）不放，5秒后自动开机，松开按键。
- (2) **基本设置：**
 - ① **密码设置/登录：**点击手表主界面“基本设置”按钮，首次使用需给手表设置密码登录，设置成功后点击“进入设置”，也可以进行重置密码操作。如忘记了密码，可使用超级密码：168888
 - ② **显示模式：**包括简单模式和详细模式两种。以主机的语音播报方式设置为“播报病房床位号”为例，如下图：

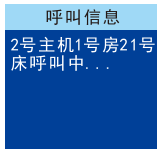

(简单模式)

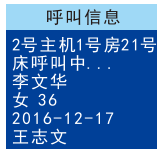

(详细模式)

- ③ **工作模式：**提供“护工模式、普通模式”工作模式，普通模式默认接收所有分机信息，也可选择“仅接收以下分机信息”，输入分机号，进行手动添加。

注：使用手表时，请根据使用场景设置使用模式。

1. **护工模式：**护工使用，只能接收医院病床分机多功能手持上“呼叫护工”按键的呼叫。
2. **普通模式：**护士使用，在此模式下可接收、查看医院病床分机的呼叫信息。

- ④ **主机IP：**输入直属主机的IP地址，按确定保存。
- ⑤ **恢复出厂：**确认后可恢复出厂默认。
- ⑥ **提示功能：**提供“仅震动、铃声+震动、仅铃声、持续铃声震动”四种提示方式。
- ⑦ **休眠时间：**有“15秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、30分钟”7种时间供选择。
- ⑧ **WIFI连接：**选择需要连接的WIFI名称，输入密码连接（注：需和主机在同一网段）。
- ⑨ **语言设置：**有“简体中文、繁体中文、English”可供选择。
- ⑩ **帮助：**可查看本机的帮助信息。

二、使用方法：

- (1) **接收呼叫信息：**分机呼叫主机，主机将数据发送给手表接收机，手表接收机收到数据后，信息立即以红色文字显示，并有震动和声音提示，长按几秒后弹出处理对话框，按“确定”处理，信息以白色文字显示。接着处理下一个未处理信息，没有未处理信息则回到待机界面。
注：根据主机的语音播报方式设置和本机设置的显示模式，分机呼叫时显示方式不同。
- (2) **历史记录：**点击主页的“历史记录”可查看历史呼叫记录，历史呼叫记录为已处理信息（最多显示30条）。
- (3) **关机：**长时间不用时，可长按手表右侧按键（右下角按键）不放，弹出“关机、重启、超级省电、最近任务”，点击关机即可。
- (4) **充电：**用配送的充电座充电。