

# IP网络寻呼主机

—— 产品安装使用说明 ——




LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司


## 一、安装调试：

### 1、产品安装图

壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

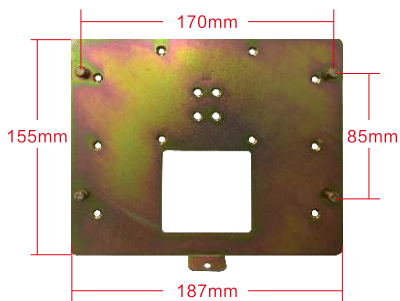

壁挂墙面安装螺丝开孔尺寸图

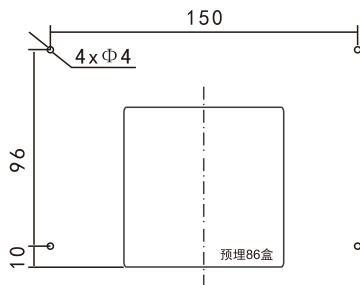

说明:

- 1、墙面打螺丝，螺丝孔距离:96x150mm，将主机安装在墙上；
- 2、主机背面有四个挂孔，对应于安装支架的挂柱上，再将设备向下推动卡住即可。（支持客户自购）


桌面式安装示意图



利用主机自带支架立在桌面

## 2、背面接口说明：

分机背面接口图

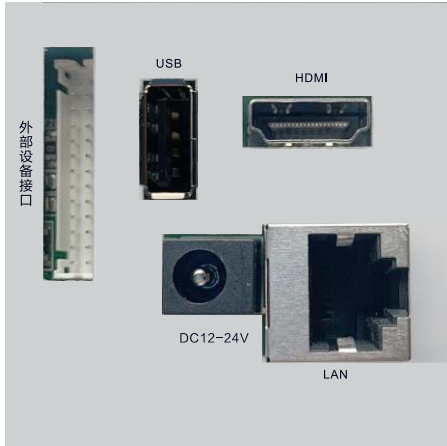

- (1) **网络接口**：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上。
  - (2) **电源接口**：将自带的（12V/2A）电源的输出插头接到此处，给设备供电。
  - (3) **USB接口**：可外接鼠标，操作机器。
  - (4) **HDMI**：高清接口，可通过HDMI线与电视相连。
  - (5) **耳机接口**：可外接耳机使用。
- 注：外部设备接口暂未开启。

## 二、设置调试

注：主机界面的“系统设置”中，除“系统信息”项外，其它设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。

- 1、**系统信息**：可查看主机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、IP地址等信息）。
- 2、**基本设置**：安装完毕检查无误后，待主机启动完毕后，（首次启动）系统自动显示“基本设置”界面：  
方法一：手动设置网络（默认）。  
使用手动设置网络时，默认“点对点工作模式”，需输入本机编号（范围为1-600）、地址盒IP、本机IP（必须为静态IP）。例如：利用数字键盘，输入以下信息：  
“本机编号”：25（注：本机编号不可重复）；  
“地址盒IP”：192.168.1.169（出厂默认）；  
“本机IP地址”：192.168.1.22，  
“子网掩码”：255.255.255.0，  
“默认网关”：192.168.1.1，最后按“保存”键，主机将重新启动。

方法二：全自动设置网络（此处不做详细介绍）。

也可通过访问设备Web页面进行设置：打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址（192.168.1.168为出厂默认IP地址）并按回车。在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是admin），最后按“确定”，即进入Web界面，设置方法同上。

- 3、**铃声选择**：可对呼入音量和报警音量进行选设置，选择某个铃声文件可试听，选好后直接按“保存”即可设置成铃声。
- 4、**音量设置**：点击进入后，可设置本机免提喇叭、铃声音乐和按键音量大小。

## 三、使用说明

### 1、接听网络分机呼叫及对讲：

按下分机上的“呼叫/报警”键，主机上会显示呼入的分机号，同时伴有语音播报及音乐提示声，按一下“接听”键可与分机双向通话（免提对讲方式：按住“呼叫/对讲”键可对该分机讲话，松开“呼叫/对讲”键可听对方讲话；与全双工分机讲话，可以不用按“呼叫/对讲”键直接对讲）。

**注：如是病床分机呼叫时，则是按下分机面板上的“呼叫/解除”键或按手持呼叫器上的“CALL”键，所有的医生主机、护士站主机均同步显示呼入的病房、病床号，主机语音播报“XX号房XX号床呼叫”，接听与对讲方式同上。**

### 2、呼叫分机或主机：

在主机上输入要对讲的设备编号，再按“呼叫”键即可呼叫相应的设备，接通后可直接对讲；

呼叫主机：“3位主机号 + #键”；

呼叫/监听本主机下的分机：“分机号+呼叫键”（分机号为1-3位）；

呼叫/监听其它主机下的分机：“3位主机号+3位分机号+呼叫键”；

例如：呼叫102号主机：输入“102#”，可进行双向可视对讲；

呼叫/监听本主机下的16号分机：输入“16”再按“呼叫”键，可监听该路分机；

呼叫/监听108号主机下的12号分机：输入“108012”再按“呼叫”键，可监听该路分机。

**注：3位主机号的前面高位为0可省略输入。**

### 3、通话记录：

点击通话记录按钮，可进入查看通话记录列表，点击某个设备号可呼叫该设备，并可对列表中的信息进行筛选操作。