
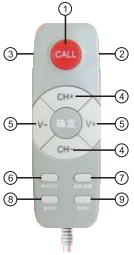


# 床旁交互终端

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

床旁交互终端部件详解	手持呼叫器部件详解
 <p>① 15.6寸触屏屏      ⑤ 喇叭口</p> <p>② 咪头                ⑥ 开关按钮：待机时，按一下 可关闭屏幕背光，再按一下点亮屏幕</p> <p>③ 摄像头</p> <p>④ CALL键            ⑦ 手持呼叫器</p>	 <p>① CALL键</p> <p>② 扫描按钮</p> <p>*③ 扫描枪（选配）</p> <p>*④ 电视调频按钮“CH+、CH-”</p> <p>*⑤ 电视音量按钮“V+、V-”</p> <p>*⑥ 呼叫护工键</p> <p>*⑦ 换药/提醒键</p> <p>*⑧ 床头灯控制键</p> <p>*⑨ 照明灯控制键</p> <p>注：*号表示功能暂未启用。</p>

## 一、安装调试：


### 1、产品安装图

背面的4个螺丝位对应与无极悬停支架4个螺丝位打好螺丝固定。

床位分机背面的4个螺丝位



无极悬停支架4个螺丝位

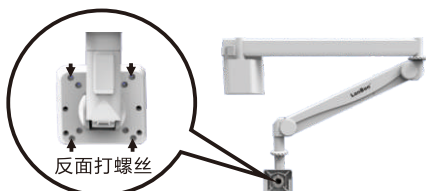

注：可搭配移动推车使用（需配备wifi模块）



## 2、背面接口说明：



1、**网络接口**：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上。

2、**电源插头**：将自带的（12V/2A）电源的输出插头接到此处，给设备供电。

### 3、外部设备接口的应用：

- (1) 接门灯（HBW-ME）：设备门灯电源(白)、门灯控制(棕)、地线(黑)与门灯的“红”“白”“黑”三芯线相连。
- (2) 接门灯（NBW-ME5）：将床位分机的电源输出（绿）门灯数据（黄）地线（黑）三芯引线对应与门灯上红、白、黑三芯引线相连；
- (3) 接ANW3：将床位分机的外接按钮（棕）地线（黑）两芯引线对应与ANW3的两芯线相连（不分极性）；
- (4) 接ANW4：将床位分机的报警输出（白黑）外接按钮（棕）地线（黑）三芯线对应与ANW4的红、白、黑三芯引线相连；

**注：其它接口暂无需使用。**

## 二、设置调试：

**注：长按主界面上的系统时间3秒以上进入系统设置（有些设置需要密码方可进入，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看）。**

1、**系统信息**：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、分辨率、软件版本等信息）。

### 2、基本设置（必填）：

**注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台设有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。**

安装完毕检查无误后，插上电源自动开机，待床位分机启动完毕后，长按主界面上的系统时间3秒以上进入系统设置，选择“基本设置”项进入（进入需输入密码，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看）依次输入分机的编号及IP地址，例如：

#### (1) 常规设置中：

“本机编号”：52（注：范围为1-1000，编号不可重复）；

“主机IP地址”：192.168.2.12（注：主机IP是唯一的，分机处此项设置应填写同一个主机IP地址）；

#### (2) 网络设置中：

“本机IP地址”：192.168.2.26；“子网掩码”：255.255.255.0；“默认网关”：192.168.2.1；

按“保存”，设备将重新启动。

注：①一定要输入所属主机的IP地址；一套系统内最多可设定1000台病床分机。以上设置只是举例说明，请根据自己的网络情况进行设置。如主机没连接网络，本机会提示：注册到主机失败。

②设备若配置移动推车时支持无线通讯功能，当开启WIFI连接时，与医院内无线网络连接，可与探视管理主机、家属分机进行双向可视对讲。

3、高级设置：进入高级设置时会弹出密码输入框，密码为序列号后四位（序列号可在系统信息中查看）。

(1) 屏保设置：

① 是否开启屏保功能：默认关闭屏保，拨动右侧开关可开启，开启后可设置屏保睡眠时间和画面。

② 屏保休眠时间：有1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟供选择。

③ 屏保画面：有气泡、数字时钟两种画面供选择。

(2) 外接大屏设置：开启，输入多媒体控制盒IP即可（多媒体控制盒需要设置网络对讲-实时就看显示屏模板）。

(3) 重启与恢复出厂：重启即重启本机，恢复出厂所有设置都将变成出厂状态。

设置好后，系统重新启动进入主界面。

### 三、使用说明：

1、**首页**：可显示对应的床位号、病人的基本信息，并对护理等级、计量、饮食、隔离、过敏等多种护理状态进行标识提醒。

2、**呼叫护士站**：点击设备右下角或手持呼叫器上的“CALL”按键，并语音播报“正在呼叫 请稍候”，此时主机上相应的路选分机键和该病房门口机上相应的病床号同时呈红色闪亮，点击10号主机上的20号路选分机键接听（路选分机键变成绿色常亮）可双工可视对讲（呼叫过程中，可按下屏幕上的“挂断”键或手持呼叫器上的“CALL”键取消呼叫）。

3、**费用查询**：点击进入后可查看费用汇总、费用明细及每日清单。

4、**吸氧计时**：可设置吸氧的倒计时，计时结束后向护士站主机报警提示。

5、**点播直播**：需配合点播直播服务器使用，点击此按键可观看点播直播视频。

6、**信息发布**：需配合信息发布服务器使用，在信息发布服务器上编辑发布视频、图片等内容，发布后可在终端上查看到发布的内容。

7、**消息通知**：需配合信息发布服务器使用，在信息发布服务器上编辑消息通知内容，发布后可在终端上查看到发布的消息通知。

8、**医院简介**：在管理服务器上编辑医院简介的图片和文字内容，终端可点击此按键进行查看。

9、**服务评价**：点击此按键进入后可对医生、护士进行评星或文字评价。

10、**上网浏览**：点击此按键进入后可上网浏览网页、图片等信息。