

IP门口机

产品安装使用说明




LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、安装调试

1、产品安装图

壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

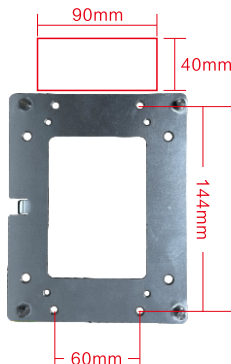

说明:

- 1、如图所示，在墙面上打4个螺丝孔，螺丝孔距离为60*144mm；
- 2、在壁挂板的上方5mm处，再开一个槽，尺寸为40*90mm，相应的线缆从此槽引出；
- 3、将配送的壁挂支架根据螺丝孔位固定在墙面上，相应的线缆接好设备的接口或引线上，线材整理好放入槽内；再将设备挂于支架上，设备背面有4个挂孔，对应于壁挂支架的挂挂上，最后将设备向下推动卡住即可；
- 4、侧面有个M4的锁紧螺丝需要锁紧防脱。

2、背面接口说明：

(1) 网络接口：将配送的“网络水晶头转引线”插入到网口接口(注意方向)，再连接网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上(需和所属主机在同一局域网内)。

(2) 电源接口：将配送的“电源红黑引线”插入到电源接口(注意方向)，红线、黑线分别于另购电源箱的其中1对+24V、GND接线柱对应连接，给分机供电(供电范围12~24V)。

(3) 外部接口：(外部接口设备必须先接入再通电，拔掉时必须先断电)


① 外接门灯(HBW-ME)：将门灯电源(白)、门灯控制(棕)、地线(黑)与门灯的“红”“白”“黑”三芯线相连。

② 外接门灯(NBW-ME5)：将接门灯的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接入门灯的红、白、黑3芯线上。

③ 外接报警按钮(ANW3)：将接报警按钮的“电源-、检测”2芯引线对应接接到报警按钮的2芯引线上，无需分极性。

④ 外接报警按钮(ANW4)：将接报警按钮的“电源+、电源-、检测”3芯引线对应接接到报警按钮的红、黑、白3芯线上。

分机背面接口图

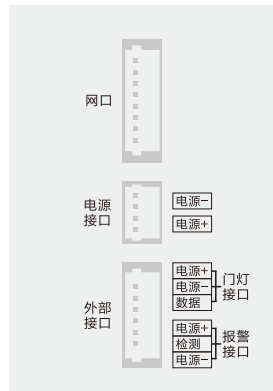

二、设置调试

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台设备，避免网络冲突。

1、基本设置：

设备通电后，在启动界面会显示本机的IP地址(默认为192.168.1.168)，登录该设备的网页(登录地址即该设备的IP地址，账号密码均默认为admin)，进入基本设置界面，设置方法如下，如将该设备设置成1号主机下的1号门口机，依次输入以下信息

A、编号设置

本机编号：主机路数根据1号主机实际型号路数选择，路数决定了门口机的编号最大值，主机编号框输入1，门口机编号框输入1。

地址盒IP：输入和1号主机基本设置界面里的相同服务器地址盒IP，如192.168.1.169。

B、网络设置

IP地址：输入该设备所分配的IP地址，如192.168.1.101。

子网掩码：输入该设备所分配的掩码地址，如255.255.255.0。

默认网关：输入该设备所分配的网关，如192.168.1.1。

C、病房号

病房号：输入该设备所分配的房间号或名称，如101房。

基本设置 保存

编号设置

本机编号: 30路主机 001 001 (主机路数+主机编号+ 门口机编号)

地址盒IP: 192.168.1.169

网络设置

IP地址: 192.168.1.101 (填写后会触发检测机制, 请耐心等待!)

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.1.1

病房号

病房号: 101房

(修改单位名称内容实时更新, 无需保存配置, 最多不能超过10个字)

2、分机编码：

若该门口机还需要管理床位分机时，还需要将该门口机关联病床分机编号，可通过主机的病房一览表界面长按该门口机编号路选按钮，并根据提示选择需要关联的病床分机编号即可；还可以通过服务器网页端智慧病房-病房对讲设备-设备绑定页面对应的主机号下的门口机编号选择需要关联的病床分机编号。

3、设置工具或APP：

打开设置工具，根据门口机的mac地址搜索或直接选择该门口机进行编号、网络、病房号、以及绑定的病床分机等进行设置。

打开APP，通过扫描门口机初始界面上的二维码信息，对该门口机进行编号、网络、病房号、以及绑定的病床分机等进行设置。

三、使用说明：

1、呼叫主机：

按下门口机右下的呼叫按键，即进入呼叫状态，待主机接通后，可进行双向全双工通话。

注：呼叫及通话功能，仅限于带触摸屏款的门口机有效。

2、进入护理：

按下门口机右下的护理按键，即进入护理中状态，主机及其他设备会提示该房护理中等提示，取消时再次按下护理按键即可。若该门口机所绑定的病床分机有呼叫时按下护理按键，会先清除病床分机的呼叫，再进入到护理中状态。

注：进入护理功能，仅限于带触摸屏款的门口机有效；若门口机含刷卡模块，还可以通过刷卡来实现进入护理的功能

3、信息显示：

该门口机除了显示病房号、床位号、患者信息详情、责任医生和责任护士姓名和照片等展示信息外，还可以显示病床分机的呼叫、洗手间报警等联动提示信息。

4、门灯提示：

该门口机除了两侧内置灯带外，还可以外接门灯扩展，主要用来门口机的进入护理状态、绑定的病床分机呼叫、以及洗手间报警等闪亮提示用。