

IP门口机

— 产品安装使用说明 —



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

- (1) **网络接口**：通过网线接入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上。
- (2) **电源接口**：将标配电源接入电源接口，给设备供电。
- (3) **其他接口**：USB接口、HDMI、耳机接口为功能扩展口。
- (4) **外部设备接口应用**：（参考上图）
- (5) **门口机外接门灯**：
 - ① 将门灯（ME5）的红、白、黑接门口机的门灯电源、门灯控制、地线。
 - ② 将门灯（ME）的红、白、黑接门口机的门灯电源、门灯控制、地线。
- (6) **门口机接洗手间按钮**：
 - ① 接ANW3时，按钮的两芯线分别接在洗手间按钮上，不分极性；
 - ② 门口机接ANW4洗手间三芯线按钮：按钮的白线接门口机的洗手间按钮蓝线、按钮的黑线接门口机的洗手间按钮黑线、按钮的红线接门口机电磁锁②的红线。
- (7) **门口机接AN-K**：AN-K的地线、信号、电源接口对应接在门口机的门灯源地、门灯控制、门灯电源。

二、设置调试：

1、基本设置：

注：由于设备出厂时默认使用IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台设备，避免网络冲突。

- (1) IP门口机通电后，在启动界面会显示本机的IP地址（默认为192.168.1.168），设备启动后，登录该设备的网页（登录地址即该设备的IP地址，账号密码默认为admin）进入“基本设置（必填）”界面，设置方法如下：例如，将病房门口机设置成10号NNV主机下的20号病房门口机，依次输入以下信息。

“本机编号”：NN-120.010、020（主机型号为NN主机，设备编号不可重复）

“医生主机”：015（可输入一个需要呼叫的主机号即可）

“地址盒IP”：192.168.1.169（需和主机输入同一个IP地址）

“本病房号”：1002（可以自定义房号）

“IP地址”：192.168.1.22

“子网掩码”：255.255.255.0

“网关”：192.168.1.1

“信息发布服务器”：192.168.1.111

“信息服务端口”：8085

最后点“保存”按钮，设备将重新启动。设置完成，设备可正常呼叫对讲。按以上步骤，给设备接入网络并设置好。

(2) 分机编码：

如果IP门口机需要管理IP床位分机，需要将该IP床位分机由“未分配分机”列表移至“本机分机”列表，点击保存按键，即可将已添加的床位分机绑定在此IP门口机下。依此方法绑定IP床位分机。

2、系统设置：

注：IP门口机主要作为电子门牌使用，除了房号、床位信息展示外还可以显示分机呼叫、洗手间报警等信息，本身还具备护理定位和与护士站双工对讲功能。

- (1) **基本设置**：登录IP门口机的网页后，在“基本设置”界面中根据提示将编号设置和网络设置填写正确，保存后即可使用（如系统中配备了信息发布服务器，才需填写信息发布服务器的IP地址和服务器端口。）。

- (2) **设置病房号**：可在IP门口机网页上，基本设置选项的“病房号”输入框中自定义输入病房号。
- (3) **分机编码**：在网页端“高级设置”设置界面，将需要绑定的分机从“未选中分机列表”中添加到“本机分机”列表中保存即可。
- (4) **进入护理**：短按门口机上的呼叫按键，门口机进入护理状态。
- (5) **呼叫护士站**：长按呼叫按键约2秒，可呼叫护士站主机。
- (6) **系统设置**：

注：登录该设备网页（即该设备的IP地址，账号密码默认为admin）进入设置界面

- ① **系统信息**：可查看分机的详细信息(包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、IP地址等信息)。
- ② **基本设置(必填)**：设置方式前面已介绍。
- ③ **声音亮度设置**：可点击拖动进度条设置系统音量、媒体音量、通话音量及屏幕亮度。
- ④ **分机编码设置**：设置方式前面已介绍。
- ⑤ **其他设置**：可设置医生护士照片和呼叫按钮为门口机的主界面，最后点击保存即可(界面设置)。
- ⑥ **配置管理**：可进行恢复出厂设置。
- ⑦ **系统重启**：对设备进行重启。