

#### 四、使用方法：

##### 1、在护士站主机上输入分机床位信息、责任护士和医生信息：

- (1) **输入分机床位信息：**在主机主界面上，按住对应的分机键3秒，即可在弹出的分机信息框中输入或修改。  
 (2) **输入责任护士、责任医生的姓名：**在主机主界面左边，选择“呼叫门口机”键；再按住某个路选门口机键3秒，会弹出对话框，可手动选择某科室下的护士、医生的姓名。保存后，系统会自动从HIS交互服务器上获取医生和护士的照片到病房门口机上（注：也可在此点击分机按键，输入分机床位信息，方法相同）。

##### 2、护士、医生照片的上传：

在电脑型地址盒的“系统设置”--“照片管理”中“医生、护士照片管理”：将在列表中为某个医生（或护士）增加相片。点击某个医生后面的操作按钮，可在对话框中点击“浏览”按钮，在电脑中选择一张照片打开，最后点击“保存”。

##### 3、显示本病房内分机呼叫信息：

分机呼叫时，病房门口机上该路分机按键显示红色常亮，伴有语音播报“XX号分机呼叫”及音乐提示声，同时该病房门外的门灯亮。

**注：**病房门口机不可接听病床分机呼叫，只便于走廊中的护士查看；如护士站主机接听了该路分机呼叫时，病房门口机上该路分机按键显示绿色常亮。

##### 4、呼叫主机：

**注：**病房门口机呼叫主机时门灯闪亮红色，接听通话后门灯变为红色常亮。

- (1) **护士站主机：**点击病房门口机上的“呼叫护士站”键，即进入呼叫状态，待护士站主机接通，可双向对讲。  
 (2) **呼叫解除：**点击病房门口机上的“呼叫解除”键，可解除本房间内的分机呼叫状态。  
 (3) **呼叫医生：**点击病房门口机上的“呼叫医生”键，可呼叫医生。

##### 5、护理定位功能：

护士按下病房门口机上的“进入护理”按键，按键变为绿色显示“护理中”，该病房门口机门灯常亮青色，走廊显示屏显示“XXXX房门口机 护理中”，离开时可再次按下此键解除该功能。

##### 6、系统设置

**注：**登录该设备的网页（即该设备的IP地址，账号密码默认为admin）进入设置界面

- (1) **系统信息：**可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、IP地址等信息）  
 (2) **基本设置（必填）：**设置方式前面已介绍。  
 (3) **声音亮度设置：**可点击拖动进度条设置系统音量、媒体音量、通话音量及屏幕亮度  
 (4) **分机编码设置：**设置方式前面已介绍  
 (5) **其他设置：**可设置医生护士照片和呼叫按钮为门口机的主界面，最后点击保存即可（界面设置）  
 (6) **配置管理：**可进行恢复出厂设置。  
 (7) **系统重启：**对设备进行重启。


# IP门口机

## 产品安装使用说明





## 一、背面接口说明：

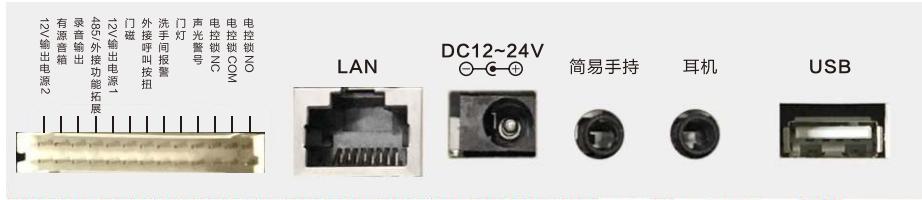

1、**网络接口**：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上。

2、**电源接口**：将12V/2A电源的输出插头接到此处，给设备供电。

3、**简易手持**：可外接简易手持与对方说话。

4、**耳机**：可外接耳机与对方说话。

5、**USB**：通用USB接口，可外接鼠标等。

6、**外部设备接口的应用**：(参考右图)

(1) **外接门灯 (HBW-ME)**：

将门灯电源(白)、门灯控制(棕)、地线(黑)与门灯的“红”“白”“黑”三芯线相连。

(2) **接防水报警按钮 (ANW3)**：

将门口机上的洗手间报警的黑、橙线与防水按钮两芯线相连(不分极性)。

(3) **接防水报警按钮 (ANW4)**：

将报警按钮的红、黑线对应与声光警号白、黑线相连；将报警按钮的白线与洗手间报警的橙线相连。

(4) **接按钮接线盒 (AN-K)**：

将门口机的红(电源输出2)、黑(地线)、白(外接功能扩展口)三芯引线对应于AN-K上的电源、地线、信号接口相连。

外部设备接口功能与颜色对照表												
12V输出电源2	有源音箱	录音输出	485外接功能拓展	12V输出电源1	门磁	外接呼叫按钮	洗手间报警	门灯	声光警报	电控锁NC	电控锁COM	电控锁NO
黑红	黑粉	黑紫	黑白	黑黄	黑蓝	黑黄	黑橙	黑棕	黑白	黑红	黑灰	黑绿

## 二、基本设置：

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

1、将病房门口机插上网络并通电，设备启动中会显示IP（默认为192.168.1.168），待设备启动完毕后，登录该设备的网页（即该设备的IP地址，账号密码默认为admin）进入“基本设置（必填）”界面，设置方法如下：

例如：将病房门口机设置成10号NN主机下的20号病房门口机，依次输入以下信息：

“本机编号”：NN-120、010、020（主机型号为NN主机，设备编号不可重复）

“医生主机”：015（可输入一个需要呼叫的主机号即可）

“地址盒IP”：192.168.1.169（需和主机输入同一个IP地址）

“本病房号”：1002（可以自定义房号）

“IP地址”：192.168.1.22

“子网掩码”：255.255.255.0

“网关”：192.168.1.1

“信息发布服务器”：192.168.1.111


“信息服务端口”：8085

最后点“保存”按钮，设备将重新启动。设置完成，设备可正常呼叫对讲。按以上步骤，给设备接入网络并设置好。

## 2、分机编码：

如果门口机需要管理数字病床分机，需要将该数字病床分机由“未分配分机”列表 移至“本机分机”列表，点击保存按钮，即可将已添加的病床分机号归到本病房门口机下管理。依此方法，进入每个病房门口机的分机设置页面中，选中需要添加管理的网络病床分机号。

## 三、安装示意图：

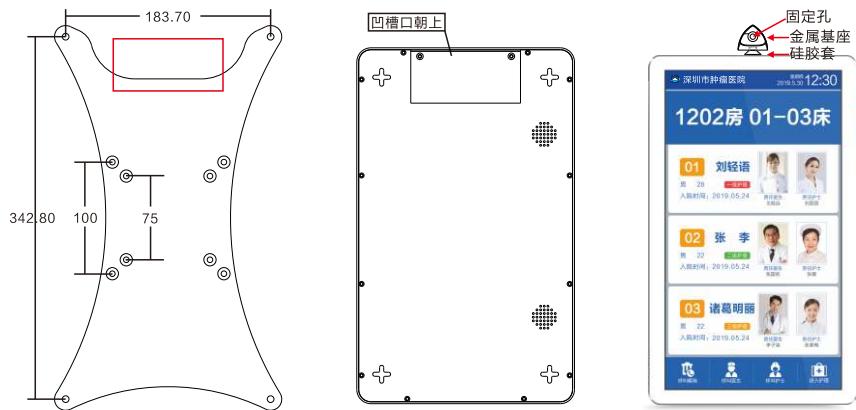

### 注：

(一) 先在墙面打螺丝，螺丝孔距：100X100mm或75X75mm，将配送的壁挂铁板固定在墙面上。

(二) 再将机器挂于壁挂板的四个挂孔上，将机器向下推动卡住。

(三) 为防止机器松动，将防脱扣置于机器上方，硅胶套紧紧顶住机器上方铝框之后拧紧螺钉。